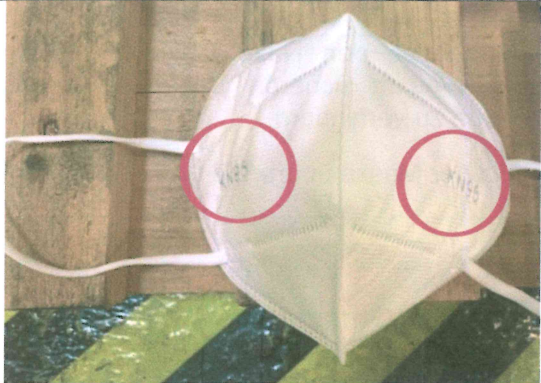

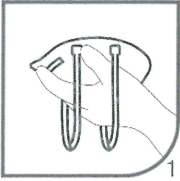
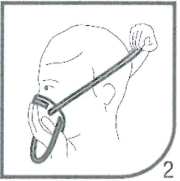
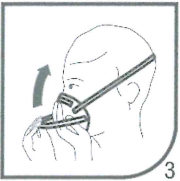
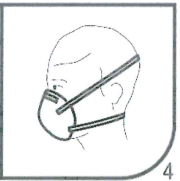




Diese Hinweise und die Prüfbescheinigung jeder Kleinstpackung beifügen oder elektronisch zur Verfügung stellen!

Schutzmaske zum einmaligen Gebrauch			
Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung			
Beschreibung der Schutzmaske (Bestands-Nr. 58):			
Hersteller	Produktbezeichnung	Markenzeichen	Typbezeichnung
Foshan Kindly Care Products Co., Ltd.	KN95 protective mask		Y-9500
Kennzeichnungen auf der Schutzmaske		verwendbar bis	Einsatzbereich
KN95		April 2022	geeignet für medizinische Fachkräfte zum Schutz vor Infektionen mit SARS - CoV-2
			
Besondere Hinweise zur Verwendung der Schutzmaske:			
<p>Die Schutzmaske ist keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und kein Medizinprodukt. Als filtrierende Halbmaske kann sie jedoch während der Corona-Pandemie zum Schutz vor infektiösen Aerosolen verwendet werden. Für eine Verwendung außerhalb des Infektionsschutzes ist die Maske nicht vorgesehen.</p> <p>Der Nachweis ihrer Schutzwirkung wurde durch eine Überprüfung in einem geeigneten Prüflabor erbracht. Die entsprechende Prüfbescheinigung ist Bestandteil dieser Hinweise.</p> <p>Die Schutzmaske dient sowohl dem Eigen- als auch dem Fremdschutz. Sie darf einmalig und höchstens für die Dauer einer Arbeitsschicht verwendet werden. Eine Aufbereitung und Wiederverwendung ist ausdrücklich nicht vorgesehen.</p> <p>Die Maske muss vollständig über Mund, Nase und Wangen platziert und an den Rändern dicht am Gesicht anliegen. Beim Aufsetzen ist darauf zu achten, dass die Innenseite der Maske nicht durch die Hände kontaminiert wird. Dazu ist die Maske an der Kopfbänderung bzw. den Ohrschlaufen anzufassen und über die Ohren zu führen.</p> <p>Nach dem Anpassen an die Nasenform durch Formung des Nasenbügels ist der Dichtsitz der Maske zu prüfen.</p> <p>Durchfeuchtete Schutzmasken sind in nicht kontaminierten Bereichen abzusetzen oder dort zu wechseln. Benutzte Schutzmasken sind in verschließbaren Behältnissen zu entsorgen. Vor und nach dem Absetzen sind die Hände und ggf. auch die entsprechende Gesichtspartie mit Seife gründlich zu waschen.</p> <p>Achtung! Bei der Abgabe an Verwender sind diese nachweislich über die Eigenschaften und die Verwendung der Schutzmaske zu unterweisen.</p>			
Allgemeingültige Hinweise zur Schutzmaske:			
<p>Die Geeignetheit sowie die Trage- und Geruchseigenschaften der Schutzmaske sind durch den Arbeitgeber anhand der konkreten Arbeits- und Verwendungsbedingungen zu beurteilen.</p> <p>Werden Mängel an der Schutzmasken festgestellt, die die Schutzwirkung der Maske beeinträchtigen können oder ist die Maske verschmutzt, darf diese nicht verwendet werden.</p> <p>Achtung! Die Schutzmasken dürfen nur im Verantwortungsbereich des Empfängers und durch medizinische Fachkräfte verwendet und nicht an Andere weitergegeben werden.</p>			





Diese Hinweise und die Prüfbescheinigung jeder Kleinstpackung beifügen oder elektronisch zur Verfügung stellen!

Aufsetzen von Schutzmasken mit Kopfbänderung

		<p>Die Maske so in die Hand legen, dass der Nasenbügel an den Fingerspitzen liegt und die Bänder frei unter der Hand hängen.</p> <p>Die Maske unter dem Kinn ansetzen. (Nasenbügel nach oben)</p>
		<p>Das obere Band auf den Hinterkopf und das untere Band bis unter die Ohren ziehen.</p> <p>Die Bänder sind dabei nicht zu verdrehen.</p>
		<p>Mit beiden Händen den Nasenbügel der Nasenform anpassen, um einen sicheren Sitz zu erreichen und Undichtigkeiten zu verhindern.</p> <p>Den Dichtsitz der Maske überprüfen und ggf. korrigieren.</p>

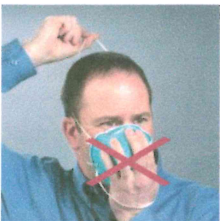
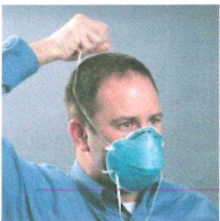
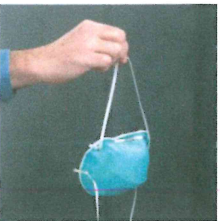
Abbildungen: 3M Deutschland GmbH

Aufsetzen von Schutzmasken mit Ohrschlaufen

	<p>Mit den Händen die Ohrschlaufen anfassen und die Maske über Nase und Kinn ansetzen. (Nasenbügel nach oben)</p>	
	<p>Die Ohrschlaufen hinter die Ohren führen.</p>	
		<p>Mit beiden Händen den Nasenbügel der Nasenform anpassen, um einen sicheren Sitz zu erreichen und Undichtigkeiten zu verhindern.</p> <p>Den Dichtsitz der Maske überprüfen und ggf. korrigieren.</p>

Abbildungen: WM M-V

Absetzen von Schutzmasken

			<p>Die Maske an den Kopfbändern oder Ohrschlaufen anfassen und abnehmen, dabei nicht die Außenseite der Maske berühren.</p> <p>Sofort in einem geschlossenen Restmüllbehälter entsorgen und gründlich die Hände waschen.</p>
---	---	---	--

Abbildungen: Centers for Disease Control and Prevention (USA)